









**El 94% de los pacientes
fueron adaptados con éxito
con 2 pares de lentes.*¹**

*La experiencia visual de una persona con un lente incluye la adaptación, el rendimiento y la comodidad.












1. Moody K, Hickson-Curran S, Wooley B, Ruston D Innovating for multifocal fitting success Optician 03.07.15 P12-17.

1-DAY ACUVUE[®]
MOIST
BRAND CONTACT LENSES
MULTIFOCAL

Siga esta tabla para seleccionar las lentes 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL de primera elección		
ADICIÓN	OJO	SELECCIÓN DELENTE
+0.75D a +1.25D	Ojo Dominante	 LOW
	Ojo No Dominante	 LOW
+1.50D a +1.75D	Ojo Dominante	 MID
	Ojo No Dominante	 MID
+2.00D a +2.50D	Ojo Dominante	 MID
	Ojo No Dominante	 HIGH



Deje que el paciente tenga una experiencia real en el exterior (fuera de la óptica) durante 10 min. antes de evaluar el rendimiento visual.

Cambios recomendados para pacientes que requieren de una mejora en su visión de lejos o de cerca	
NECESITA MEJORAR DE LEJOS	NECESITA MEJORAR DE CERCA
1-DAY ACUVUE® MOIST ESFÉRICA	 LOW
 LOW	 LOW + 0.25D
 LOW	 MID
 MID	 MID + 0.25D
 MID	 MID
 MID + 0.25D	 HIGH + 0.25D

⬆️: Añada +0.25D a la graduación de lejos.

Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses MULTIFOCAL es una marca registrada cuyos derechos de propiedad y/o de uso corresponden a Johnson & Johnson, S.A. © Johnson & Johnson S.A. 2017. Material exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración, diríjase a su representante de Johnson & Johnson S.A. Producto Sanitario conforme al Real Decreto 1591/2009. 15VIS223-ES.