









**El 94% de los pacientes
fueron adaptados con éxito
con 2 pares de lentes.*¹**












*La experiencia visual de una persona con un lente incluye la adaptación, el rendimiento y la comodidad.
1. Datos de archivo JJVC 2015.

1-DAY ACUVUE[®]
MOIST
BRAND CONTACT LENSES
MULTIFOCAL

Siga esta tabla para seleccionar las lentes 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL de primera elección		
ADICIÓN	OJO	SELECCIÓN DELENTE
+0.75D a +1.25D	Ojo Dominante	
	Ojo No Dominante	
+1.50D a +1.75D	Ojo Dominante	
	Ojo No Dominante	
+2.00D a +2.50D	Ojo Dominante	
	Ojo No Dominante	



Deje que el paciente tenga una experiencia real en el exterior (fuera de la óptica) durante 10 min antes de evaluar el rendimiento visual.

Cambios recomendados para pacientes que requieren de una mejora en su visión de lejos o de cerca	
NECESITA MEJORAR DE LEJOS	NECESITA MEJORAR DE CERCA
1-DAY ACUVUE® MOIST ESFÉRICA	
	
	
	
	
	

➤: Añada +0.25D a la graduación de lejos.

Todas las lentes de contacto de marca ACUVUE® tienen filtro UV de Clase 1 o de Clase 2 para ayudar a proporcionar protección contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. Las lentes de contacto con filtro UV no sustituyen a las gafas de sol con filtro UV ya que no cubren completamente los ojos y sus alrededores. 1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses MULTIFOCAL es una marca registrada cuyos derechos de propiedad y/o de uso corresponden a Johnson & Johnson, S.A. © Johnson & Johnson S.A. 2016. Material exclusivo para el uso del óptico. Lea atentamente las contraindicaciones y posibles efectos secundarios en las instrucciones de uso. Para solicitar cualquier aclaración, diríjase a su representante de Johnson & Johnson S.A. Producto Sanitario conforme al Real Decreto 1591/2009. 15VIS223-ES.